



RU

Airway Medix Oral Care

**ИНСТРУКЦИЯ ПО
ЭКСПЛУАТАЦИИ**

1.1. Инструкция по эксплуатации

В этой инструкции описана эксплуатация следующих продуктов:

Зубная щетка В-Care №32200 4-мл пипетка №PE

Перед началом эксплуатации **ЗУБНОЙ ЩЕТКИ В-CARE** прочитайте настоящую инструкцию и сохраните ее для использования в будущем.

1.2. ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

- Это изделие не предназначено для использования детьми.
- Используйте данное изделие только по назначению, как описано в данной инструкции. Не применяйте любые принадлежности, которые не были одобрены производителем.


1.3. ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ

- Это изделие не предназначено для использования детьми.
- В-Care — это зубная щетка, предназначенная для поддержания должной гигиены полости рта, в том числе для удаления зубного налета. Изделие состоит из зубной щетки и двух пипеток для жидкости.

1.4. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

- Изделие не предназначено для использования детьми.
- Обращайтесь с изделием и храните его надлежащим образом. НЕ разбирайте изделие.
- НЕ используйте изделие, если упаковка повреждена.
- Изделие можно использовать только в соответствии с целевым назначением.
- Нестерильно. НЕ пытайтесь стерилизовать изделие, в том числе в автоклаве.
- Не используйте изделие при наличии признаков повреждения его компонентов. Это может привести к травмам.
- Изделие предназначено для использования только одним человеком.


2. ОПИСАНИЕ

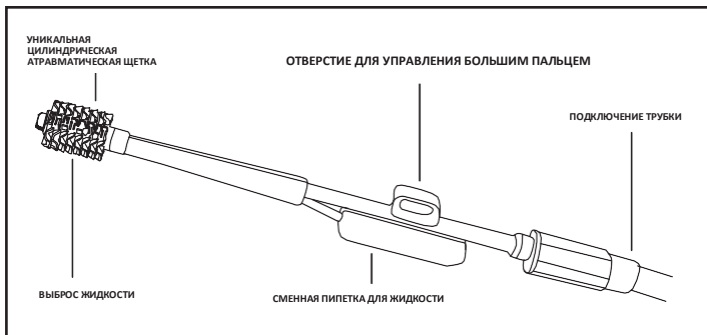

3. ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ V-CARE

3.1. Вставьте пипетку для чистящих жидкостей [Рисунок 1].

3.2. Подключите пипетку к щетке [Рисунок 2].

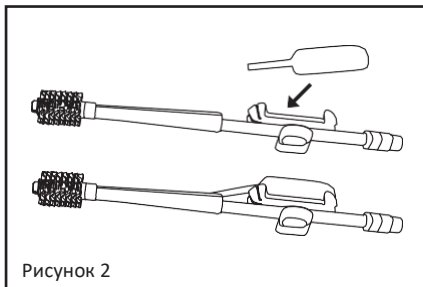

3.3. Возьмите щетку так, чтобы большой палец оказался в отверстии для управления, а указательный палец — на пипетке. Нанесите жидкость, слегка нажав на пипетку [Рисунок 3].

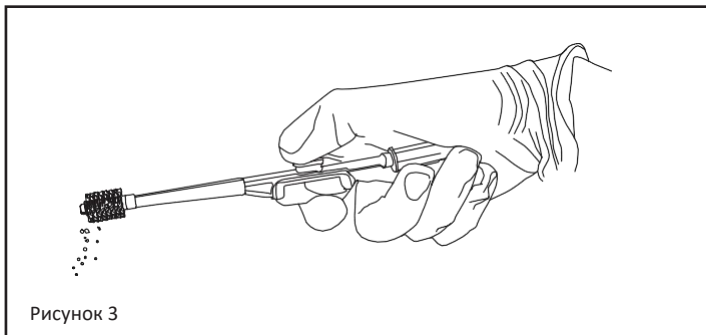


Рисунок 3

4. ГАРАНТИЯ

Мы предоставляем 2 года гарантии на изделие с даты его покупки. В течение гарантийного срока мы бесплатно устраняем любые неисправности изделия, возникающие из-за дефектов материала или изготовления, посредством ремонта или замены всего изделия, причем мы сами вправе выбирать один из этих двух способов.

Эта гарантия не распространяется на: повреждения из-за неправильного использования, нормальный износ или нормальное использование, дефекты, которые оказывают незначительное влияние на полезность или работу изделия. Гарантия аннулируется в случае выполнения ремонта изделия неуполномоченными лицами и без использования оригинальных запчастей Biovo Technologies. Для обслуживания в течение гарантийного срока комплектное изделие следует доставить лично или отправить по почте торговому представителю, который продал вам его.

Biovo Technologies Ltd.
23rd HaMelacha Street, POB 11419
Park Afek, Rosh-HaAyin, 4809173, Israel
Тел.: (+972) 72-2151115 | Факс: (+972) 72-2151112
Эл. почта: info@biovo-tech.com



Произведено для:
Airway Medix S.A.
ul. Gen. Józefa Zajączka 11/14, 01-510 Warsaw, Poland
Тел.: +48 22 408 44 80 | Эл. почта: info@airwaymedix.pl
Собрано и упаковано в Великобритании

